

8200

DEGGO II



Gebruikershandleiding

User Manual



Pegasus Zorg

NEDERLANDS

©2012 Pegasus Zorg bv

Alle rechten voorbehouden.

De verstrekte informatie mag geenzins worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze en met welke middelen dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van *Pegasus Zorg bv*.

De verstrekte informatie is gebaseerd op algemene gegevens aangaande de ten tijde van verschijnen bekende constructies. *Pegasus Zorg bv* voert een beleid van continue product verbetering, wijzigingen zijn derhalve voorbehouden.

De verstrekte informatie is geldig voor het product in standaard uitvoering. *Pegasus Zorg bv* kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit de van de standaard uitvoering afwijkende specificaties van het product.

De beschikbare informatie is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar *Pegasus Zorg bv* kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de informatie of voor de gevolgen daarvan.

Pegasus Zorg bv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade voortvloeiend uit werkzaamheden die door derden zijn uitgevoerd.

De door *Pegasus Zorg bv* gehanteerde gebruiksnamen, handelsnamen, handelsmerken, etc. mogen krachtens de wetgeving inzake de bescherming van handelsmerken niet als vrij worden beschouwd.

Algemene Introductie

Alvorens u gebruik gaat maken van uw nieuwe Dego II rolstoel dient u, en indien van toepassing uw begeleider, eerst deze handleiding aandachtig door te lezen.

U dient kennis te nemen van alle mogelijkheden en restricties van uw Dego II rolstoel.

Geachte gebruiker,

U heeft zojuist een rolstoel van Pegasus Zorg aangeschaft, en wij willen u bedanken voor het vertrouwen in onze Dego II rolstoel.

De Dego II is een kwaliteitsproduct van Pegasus Zorg. De producten van Pegasus hebben zich over de jaren ongetwijfeld bewezen. U heeft gekozen voor een hoogwaardig produkt, dat u comfort en gemak zal bieden.

Deze gebruiksaanwijzing maakt U met uw hulpmiddel vertrouwd. Leest U de gebruiksaanwijzing volledig door voor U het hulpmiddel in gebruik neemt.

Onder andere word hier het basisframe en accessoires beschreven en enkele opmerkingen om ter harte te nemen. Daarnaast wordt ook verklaard hoe het basisframe en de opbouw delen op een zekere wijze te gebruiken.

De veiligheidsvoorschriften in deze handleiding zijn algemene aanwijzingen die gezien moeten worden als globale richtlijnen. Het is mogelijk dat u uw eigen manieren ontwikkelt voor veel voorkomende handelingen. Wij willen u echter adviseren een beroep te doen op een deskundige voor assistentie bij het ontwikkelen van veilige en affectieve technieken met betrekking tot uw dagelijkse activiteiten en uw fysieke mogelijkheden.

U vindt in deze handleiding tevens een uitgebreide beschrijving van alle instelmogelijkheden van uw rolstoel. Veel van deze instelmogelijkheden vereisen, net als reparaties aan uw rolstoel, de kennis van een deskundige. Wij adviseren u dan ook om deze door een deskundige te laten uitvoeren.

Vul hieronder de gegevens van uw geautoriseerde dealer in:

Bedrijfsnaam:

Adres:

.....

Telefoonnummer:

Faxnummer:

Emailadres:

Website:

Inhoudsopgave:

1	Algemene Informatie
	1.1 Opbouw en beschrijving.....
	1.2 Hoofdcomponenten.....
2	Veiligheid
	2.1 Algemene veiligheidsvoorschriften.....
	2.2 Waarschuwingen voor veilig gebruik.....
3	Gebruiksaanwijzing
	3.1 Controle en balans.....
	3.2 Het nemen van stoepen en ongelijke oppervlaktes.....
	3.3 Hellingen.....
	3.4 Parkeren.....
4	Onderhoud
	4.1 Banden controleren en oppompen.....
	4.2 De rolstoel reinigen.....
	4.3 Service en onderhoudstabel.....
5	Technische specificaties
6	Garantieverklaring

1. ALGEMENE INFORMATIE OVER UW ROLSTOEL

1.1 Opbouw en beschrijving

De Dego II is voorzien van verschillende componenten en onderdelen die op onderstaande afbeelding zijn weergegeven.

Het kan zijn dat uw rolstoel voorzien is van opties en accessoires die niet zijn afgebeeld op de voorbeeldtekening. Deze komt u echter vanzelf tegen tijdens het bestuderen van deze handleiding.

De Dego II is speciaal ontwikkeld voor gebruikers die een comfortabele zitondersteuning zoeken. De Dego II is standaard voorzien van een grote kantelverstelling, om ook te kunnen rusten in uw rolstoel.



1.2 Hoofdcomponenten

	Zitting
2	Rugleuning
3	Armsteun
4	Beensteun
5	Kantelverstelling
6	Rem
7	Voorwielen
8	Achterwielen
9	Duwbeugels
10	Hoofdsteun (optie)

U dient goed op de hoogte te zijn van de inhoud van deze handleiding voordat u de rolstoel in gebruik neemt.

2. VEILIGHEID

2.1 Algemene Veiligheidsvoorschriften

Pegasus Zorg bv stelt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel of schade veroorzaakt door het niet strikt naleven van de veiligheidsvoorschriften, dan wel door onachtzaamheid tijdens het gebruik en schoonmaken van de rolstoel en eventuele bijbehorende accessoires.

De Dego II is een rolstoel die, indien de omgangsregels zoals deze beschreven staan in deze handleiding worden opgevolgd, zeer betrouwbaar en stabiel is.

Neem direct contact op met uw dealer indien u bij het gebruik van de rolstoel een potentieel gevaar hebt geconstateerd.

- De gebruiker van de rolstoel is ten alle tijden volledig verantwoordelijk voor de naleving van de plaatselijk geldende veiligheidsvoorschriften en richtlijnen.
- Modificatie van de rolstoel zijn niet toegestaan.
- De technische specificaties mogen niet worden gewijzigd.

2.2 Waarschuwingen voor veilig gebruik

- Gebruik uw rolstoel niet op straten of autowegen, alleen op de trottoirs.
- Gebruik uw rolstoel niet op zand, ruig terrein, natte en gladde oppervlaktes of oppervlaktes met weinig grip.
- Het vervoeren van uw rolstoel is in alle voertuigen, inclusief voertuigen die speciaal aangepast en/of ontwikkeld zijn voor het vervoer van uw rolstoel, op eigen risico. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid hiervoor.
- Uw rolstoel is niet te gebruiken als stoel in een motorvoertuig.
- Probeer nooit trottoir op- of afritten zonder assistentie.

3 GEBRUIKSINSTRUCTIE

U dient de kenmerken van uw rolstoel te leren kennen en uzelf de veiligste methodes aan te leren voor uw dagelijkse activiteiten. Raadpleeg een deskundige voor assistentie bij het ontwikkelen van de veiligste en effectieve methodes met betrekking tot uw fysieke mogelijkheden.

3.1 Controle en balans

Controleer voordat u wegrijd met de rolstoel of de banden voldoende zijn opgepompt.

U dient handelingen als in- en uitstappen van de rolstoel altijd te verrichten in het bijzijn van een deskundige assistent.

3.2 Het nemen van stoepen en ongelijke oppervlaktes

De onderstaande methode is bedoelt voor als de rolstoel geduwd wordt door een begeleider en geeft de rolstoelgebruiker een veilig gevoel.

Opgaan van de stoep.

1. De begeleider dient de rolstoel voorwaarts voor de stoep te plaatsen. Vervolgens dient de begeleider de duwhandvatten naar zich toe te trekken en tegelijkertijd de voet te plaatsen op 'stepplaat' die gemonteerd zit aan de rechter achterzijde van de rolstoel.

-
2. Duw de rolstoel op de stoep of verhoging tot de achterwielen de stoep raken, laat nu de 'stepplaat' los.
 3. Til de rolstoel vervolgens aan de duwbeugels over de hindernis.
Afgaan van de stoep.
 1. Ga altijd achteruit de stoep af zodat de rolstoel niet voorover kan hellen waardoor de gebruiker uit de rolstoel zou kunnen vallen.
 2. Ga nooit zonder begeleider de stoep af.

3.3 Hellingen

Inspecteer de helling altijd op risico's zoals gaten of gladde en oneven oppervlaktes, voordat u erop of eraf gaat rijden. Als u de helling niet kan zien, vraag dan aan iemand om hem voor u te inspecteren.

Helling oprijden.

- Rijd nooit een helling op met een hellingshoek van meer dan 5 graden.
- De rolstoel is op een helling minder stabiel.
- Rijd niet op een helling als de zitting gekanteld is.
- De begeleider die de rolstoel voortbeweegt, moet blijven duwen om te voorkomen dat de rolstoel uit eigen beweging gaat rijden.
- Zet de rolstoel op de rem als en niet of onvoldoende wordt geduwd.
Helling afrijden.

Waarschuwing:

Rijd nooit met uw rolstoel van een trap af.

Bij het nemen van helling zal de rolstoel uit zichzelf gaan rijden.

De rolstoel kan worden afgeremd met de duwhandvaten.

Voorkom dat de rolstoel een te hoge snelheid behaalt.

3.4 Parkeren

Zet de rolstoel op de rem door het pedaal op de rembeugel naar beneden te trappen, of door met de hand de linker of rechter hendel naar voren te halen.

Door deze handelingen andersom te verrichten haalt u de rolstoel van de rem.

4 ONDERHOUD

4.1 Banden controleren en oppompen

- Zorg ervoor dat de banden op de juiste spanning worden gehouden.
- Overschrijd nooit de aangegeven bandenspanning.

Pomp de banden op met een fietspomp of voetenpomp. Gebruik hiervoor een verloopventiel.

U kunt de banden ook bij een benzinestation laten oppompen.

- Bandenspanning achterwiel: 2,2 bar

4.2 De rolstoel reinigen

Droog vuil afnemen

Reinig de bekleding, metalen onderdelen en framedelen met een droge zachte doek.

Modder en ander nat vuil afnemen.

Reinig de vuile delen eerst met een natte spons. Wrijf de delen daarna droog met een droge zachte doek.

- Gebruik nooit schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Deze kunnen krassen veroorzaken op de rolstoel.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen als thinner, wasbenzine of terpentine.

4.3 Service en Onderhoudstabel

Laat de rolstoel eenmaal per jaar, of bij intensief gebruik eenmaal per half jaar, controleren bij uw dealer. De onderstaande tabel toont het onderhoud dat u zelf kunt uitvoeren.

Tijd	Omschrijving
Wekelijks	Bandenspanning controleren en zo nodig banden oppompen. Zie 4.1
Maandelijks	Rolstoel reinigen. Zie 4.2 Draaisysteem van de stoel smeren.

5 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Producent	: Pegasus Zorg BV
Hulpmiddel	: rolstoel-/ortheseonderstel
Type	: DEGO II
Maximaal draagvermogen	: 100kg (gewicht gebruiker)
Breedte	: 67cm
Lengte	: 72 cm
Totaal gewicht	: 33 kg
Zithoogte	: Min: 47 cm Max: 50 cm
Zitbreedte	: Min: 40 cm Max: 50 cm
Hoogte armsteun tot zitting	: Min: 17 cm Max: 30 cm
Voorband	: 200 x 50 volle pu band
Achterband	: 12½ x 2¼ max 2.7 bar (normaal 2,2bar) Luchtband
Serienummer	: Zie etikettering
Max. Snelheid	: 5 km/h
Standaarduitvoering:	Deگو II Basisframe Zitting brug Verstelbaar rug element Duwstangen Armopvang

6 GARANTIE

Garantie bepaling

Pegasus Zorg BV verleent aan de eerste gebruiker de volgende garanties.

De garantie treedt in vanaf de datum van eerste levering.

De garantie vervalt bij reparaties of aanpassingen die door anderen dan de fabrikant of door fabrikant geautoriseerde vakhandelaar worden uitgevoerd.

De garantie vervalt ook bij verkeerd of onoordeelkundig gebruik. Verwaarlozing, overbelasting, onachtzaamheid en bij elke vorm van geweldsaanwending.

Pegasus Zorg zal, voorzover dit nodig is, onderdelen inzetten en/of reparaties uitvoeren voorzover die onder de garantie bepalingen vallen.

Het arbeidsloon voor de inzet van onderdelen en reparaties en tevens de transportkosten vallen niet onder de garantie.

Pegasus Zorg BV garandeert dat het product vrij is van gebreken in materiaal en constructie voor een periode van

1 jaar vanaf de datum van aankoop.

Deze garantie wordt uitgebreid voor het basisframe

(Art. nr D40014)

Het basisframe boven (Art. nr D40006) en de hoogte strippen (Art. nr D40008)

Voor deze onderdelen geldt een garantie van 3 jaar vanaf de datum van aankoop.