

Manuel

Le PennyTalks (PT) est un étiqueteur vocal numérique personnel enregistrant la voix de l'utilisateur et intégrant des instructions d'utilisation et de sauvegarde en temps réel.

Guide d'utilisation rapide:


Mettre une étiquette autocollante sur n'importe quel objet pour lequel vous voudriez apporter une information vocale.

Poser le capteur du PennyTalks sur l'étiquette et enregistrer votre propre étiquette vocale dans le PennyTalks.


Réécouter votre étiquette vocale en posant le capteur du PennyTalks sur l'étiquette préenregistré.

1

Avant

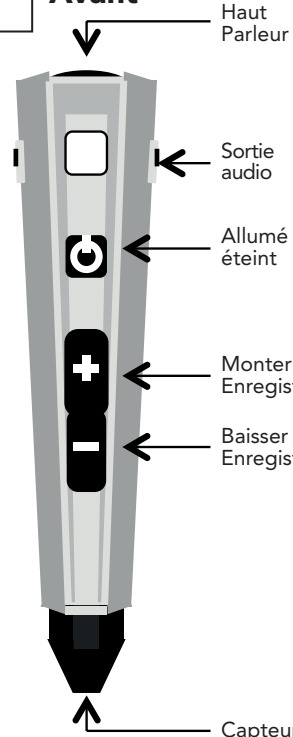


Arrière

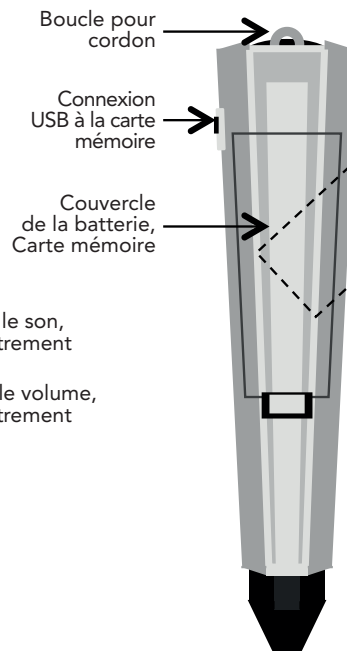

2

Carte-Mémoire micro SD:

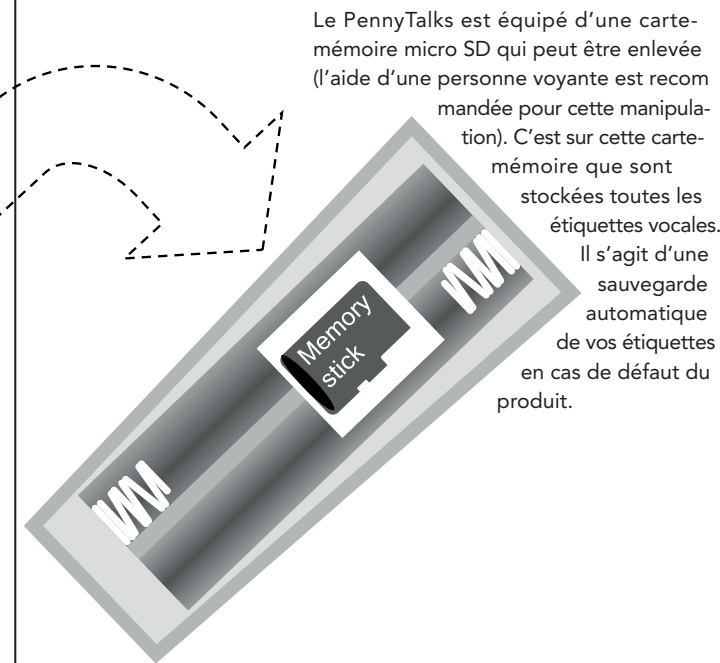

Le PennyTalks est équipé d'une carte-mémoire micro SD qui peut être enlevée (l'aide d'une personne voyante est recommandée pour cette manipulation). C'est sur cette carte-mémoire que sont stockées toutes les étiquettes vocales. Il s'agit d'une sauvegarde automatique de vos étiquettes en cas de défaut du produit.

3

Configuration de la langue pour les instructions utilisateur:

PennyTalks contient 12 modes de langues pré-enregistrées pour les instructions utilisateurs.

Il existe également un mode sonore où un son signale les instructions.

1. Appuyer sur bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
2. Avec le capteur du PennyTalks, toucher l'une des langues disponibles sur le support papier contenant des étiquettes de langues de forme rondes.
3. Le PennyTalks répète la langue choisie et la sélectionne pour de futures instructions.

4

Marche/Arrêt:

Insérer les deux piles. Maintenir appuyer le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Le support d'instruction vocal vous informe si le PennyTalks est allumé ou éteint.

Si le PennyTalks n'est pas utilisé pendant plus de 60 secondes, il s'éteint automatiquement.

Associer un enregistrement à une étiquette:

1. Toucher l'étiquette avec le capteur jusqu'à ce que le PennyTalks vocalise : « Nouvelle étiquette ».
2. Maintenir le bouton Volume + ou le bouton Volume – jusqu'à ce que le PennyTalks dit : "Commencer l'enregistrement".
3. Garder le bouton enfoncé et enregistrer l'étiquette vocale.
4. Quand l'enregistrement est terminé, relâcher le bouton.
5. Votre étiquette vocale est stockée et le PennyTalks vocalise : « L'enregistrement est effectué. ».

Volume:

Appuyer sur le bouton de diminution du volume pour le réduire ou sur le bouton d'augmentation du volume pour l'augmenter.

5

Ecouter:

Poser le PennyTalks sur l'étiquette vocale préalablement enregistrée. Le PennyTalks jouera le mémo vocal.

Effacer une étiquette vocale enregistrée:

1. Poser le capteur sur l'étiquette.
2. Le PennyTalks commence à lire l'étiquette enregistrée.
3. Maintenir appuyer en même temps sur les boutons Augmenter et Diminuer le volume jusqu'à ce que le PennyTalks vocalise : « Effacé ».

L'étiquette actuelle est à nouveau prête à être enregistrée.

Contenu de la boîte:

Deux piles alcalines (non rechargeables)
Adaptateur USB (sans fonction de charge)
Lanière
Ecouteur
Étiquettes tactiles autocollantes (160 étiquettes rondes)
Étiquettes autocollantes souples pour les vêtements pouvant être lavées et passer au sèche-linge (72 étiquettes allongées)
Support papier contenant des étiquettes de langues

Spécifications techniques:

Piles : type AAA maximum 1,5V
Entrée de l'adaptateur USB : 100-240V, 50-60Hz
Sortie de l'adaptateur USB : maximum 5V, 1000mA
Taille standard de la mémoire : plus de 2700 étiquettes
Taille de la mémoire optionnelle : plus de 9000 étiquettes